

1

レンズ装着の準備

お化粧前にレンズを装着しましょう。



まずは、石鹸で手と指を清潔にし、タオルで水分をしっかりとふき取ってください。

※爪が伸びていると、レンズや目を傷つける場合があります。レンズ装着前に短く切っておきましょう。

パッケージを一つ山折りにして切り離し、軽く振ってください。
フタは、フチまでしっかり開封します。

レンズは指の腹でそっとすくい上げて、取り出してください。

取り出しにくい場合、手のひらに保存液ごと出して、
レンズをやさしくつまみます。

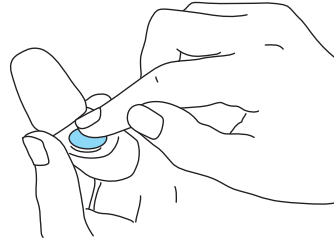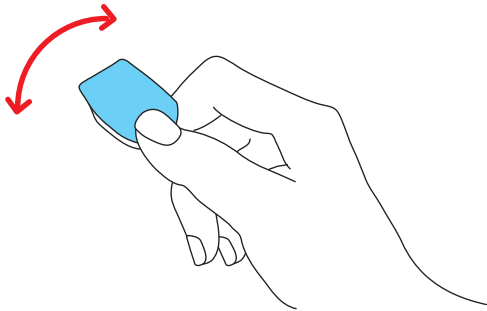

※爪を立てるとレンズを傷つける
場合があります。ご注意ください。

2

レンズのチェック

取り出したレンズは利き手の人差し指の先にのせます。欠けたり傷がついたりしていないか確認してください。

※異常があった場合は、絶対に使用しないでください。

レンズの表裏を見分けます。

横から見て、レンズのフチが丸みを帯びていたら、表です。


レンズのフチが外に反っていたら、裏です。

レンズをつまんで見分ける場合は、人差し指にのせたレンズを

反対の手の親指と人差し指でつまみます。

レンズのフチが内側に丸くなっていれば、表。


フチが外に反っていたら、裏です。

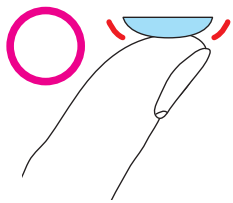


表



裏

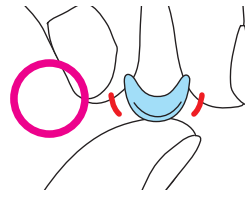

表

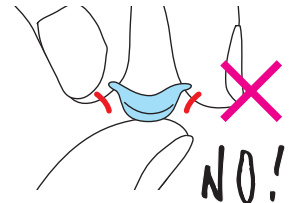

裏

3

レンズの装着

装着しようとする目と反対側の目で、鏡をしっかりと見つめてください。

一点を見つめるようにすると、黒目が目の真ん中にきて、レンズがのせやすくなります。



レンズをのせた手の中指で下まぶたを引き下げ、
反対の手の指で上まぶたを引き上げ、目を大きく開きます。
指を上下のまつげの生え際にあてると、目がしっかり開きます。

レンズを黒目にそっと乗せ、ゆっくり指を離してください。

何度か軽く瞬きすると、レンズが安定します。

レンズをはめていない方の目を手で隠し、

遠くがよく見えるか確認してください。

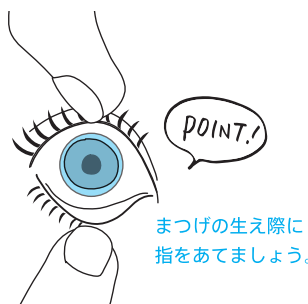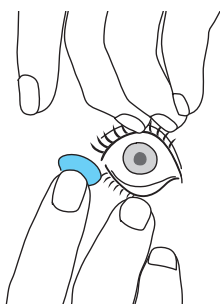

※レンズ装着後の違和感は、何度かまばたきすることで解消されますが、それでも違和感が残る場合は、一度レンズをはずしてください。