


## 装用スケジュール（装用開始後、1日に使用できる時間）


初めてコンタクトレンズを使用する方は、慣れるまでは装用スケジュールに沿って、1日の使用時間を徐々に延ばしていきます。

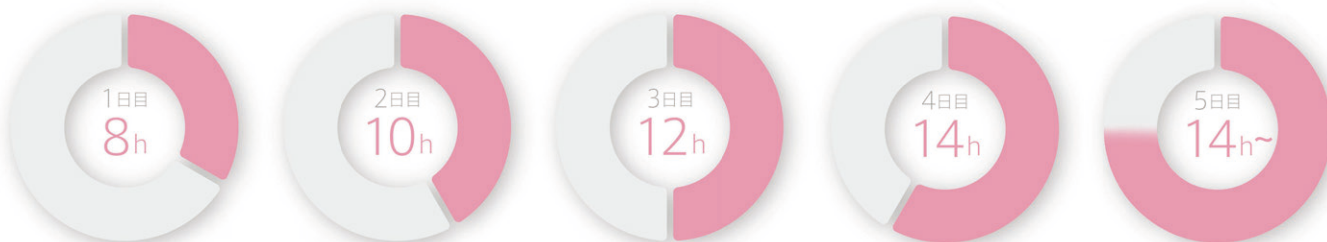

※スケジュールは個人差があります。眼科医の指示に従い、決められた装用時間を守りましょう。

### 一時、使用を中止した場合

1日目の8時間から再度スタートしてください。

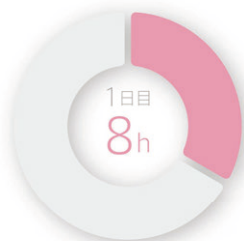


### 1ヶ月以上使用を中止した場合

検査を受け、眼科医の指示に従ってください。



### 1day コントクトは1日使い捨て

1日使い捨てレンズなので、一度はずしたら再度使用せず、必ず新しいレンズに交換してください。

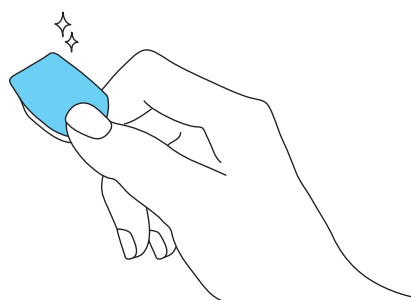

### 使用にあたっての注意点



- ・レンズに触れる前は手をよく洗い、清潔にしてください。
- ・レンズを傷つけないよう、爪は短く切っておいてください。
- ・少しでも異常を感じたら、すぐに眼科医で検査を受けてください。

説明書をよく読み、取り扱い方法を守って正しく使用してください。  
また、目の健康のために、異常を感じなくても必ず定期検査を受けるようにしてください。  
直射日光を避け、常温で保管してください。